



MAGSHAPE Pro[®]


RF

HIEMT

The
one

inBody
shaping

HIEMT működési elve

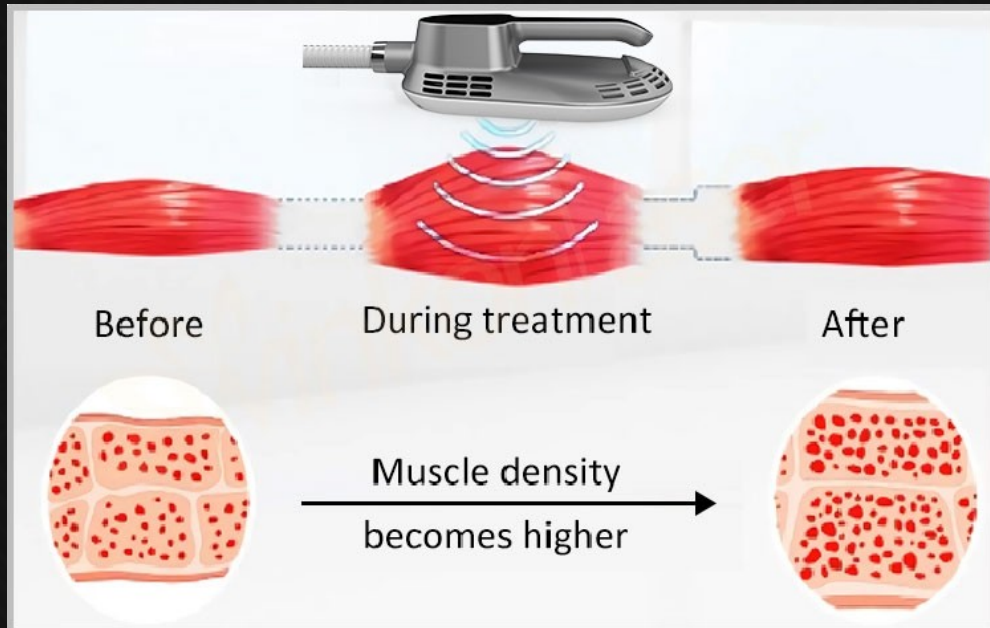


A HI-EMT (nagy energiájú, fókuszált elektromágneses hullám) technológia segítségével az izmok folyamatos, intenzív összehúzódásokon és elernyedéseken mennek keresztül, ezáltal mélyrehatóan átalakulhat az izomzat belső szerkezete. A kezelés elősegíti a miofibrillumok növekedését, vagyis az izomrostok vastagodását, valamint új fehérjeláncok és izomrostok képződését. Ennek eredményeként növekedhet az izmok sűrűsége és térfogata.

A HI-EMT technológia által kiváltott maximális intenzitású izom-összehúzódások jelentős mértékű zsírsavlebontást idézhetnek elő. A trigliceridek lebomlása során felszabaduló zsírsavak nagy mennyiségben halmozódnak fel a zsírsejtekben. A túl magas zsírsav-koncentráció a zsírsejtek apoptózisához, vagyis programozott sejthalálhoz vezethet. Az elhalt zsírsejteket a szervezet a következő hetek során természetes anyagcsere-folyamatain keresztül fokozatosan eltávolítja.

A HI-EMT technológia tehát egyszerre segítheti az izmok erősítését és növelését, valamint a zsírréteg hatékony csökkentését.

A speciális frekvenciatartomány nem teszi lehetővé, hogy az izom az egymást követő ingerek között elernyedjen, ezért az izom több másodpercen keresztül folyamatosan összehúzott állapotban marad.

Az izomépítés akkor következik be, amikor az izomszövet ismételt ilyen nagy terhelésnek van kitéve.

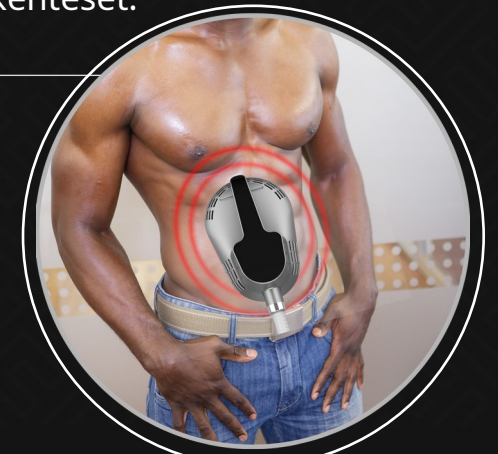

KÉT TECHNOLÓGIA EGY KÉSZÜLÉKBEN HI-EMT & RF

A Magshape Pro a világ első olyan kezelése, amely a HIEMT technológiát rádiófrekvenciával kombinálja.

HIEMT: Az elektromágneses mező több ezer, nagy intenzitású izomösszehúzódást vált ki. Ennek hatására az izomrostok és az izomsejtek a természetesnél jóval gyorsabb ütemben növekedhetnek és szaporodhatnak, ezáltal jelentősen növelhető az izmok térfogata.


RF – rádiófrekvencia:

A rádiófrekvencia által keltett hő hozzájárulhat a zsírsejtek lebontásához és elpusztításához.

A rádiófrekvenciás melegítés felkészíti az izmokat a fokozott terhelésre, hasonlóan az edzés előtti bemelegítéshez. Fokozza az izmok vérellátását, így elősegítheti azok gyorsabb és hatékonyabb fejlődését.

A technológia a bőr alatti zsírréteget is olyan hőmérsékletre melegíti, amely a zsírsejtek apoptózisát, vagyis programozott sejthalálát és lebomlását idézheti elő. A károsodott zsírsejteket ezt követően a szervezet természetes anyagcsere-folyamatai fokozatosan eltávolítják, ami tartós zsírcsökkenést eredményezhet.

A rádiófrekvenciás kezelés emellett hozzájárulhat a bőr megereszkedésének csökkentéséhez és a bőr feszebbé tételéhez.

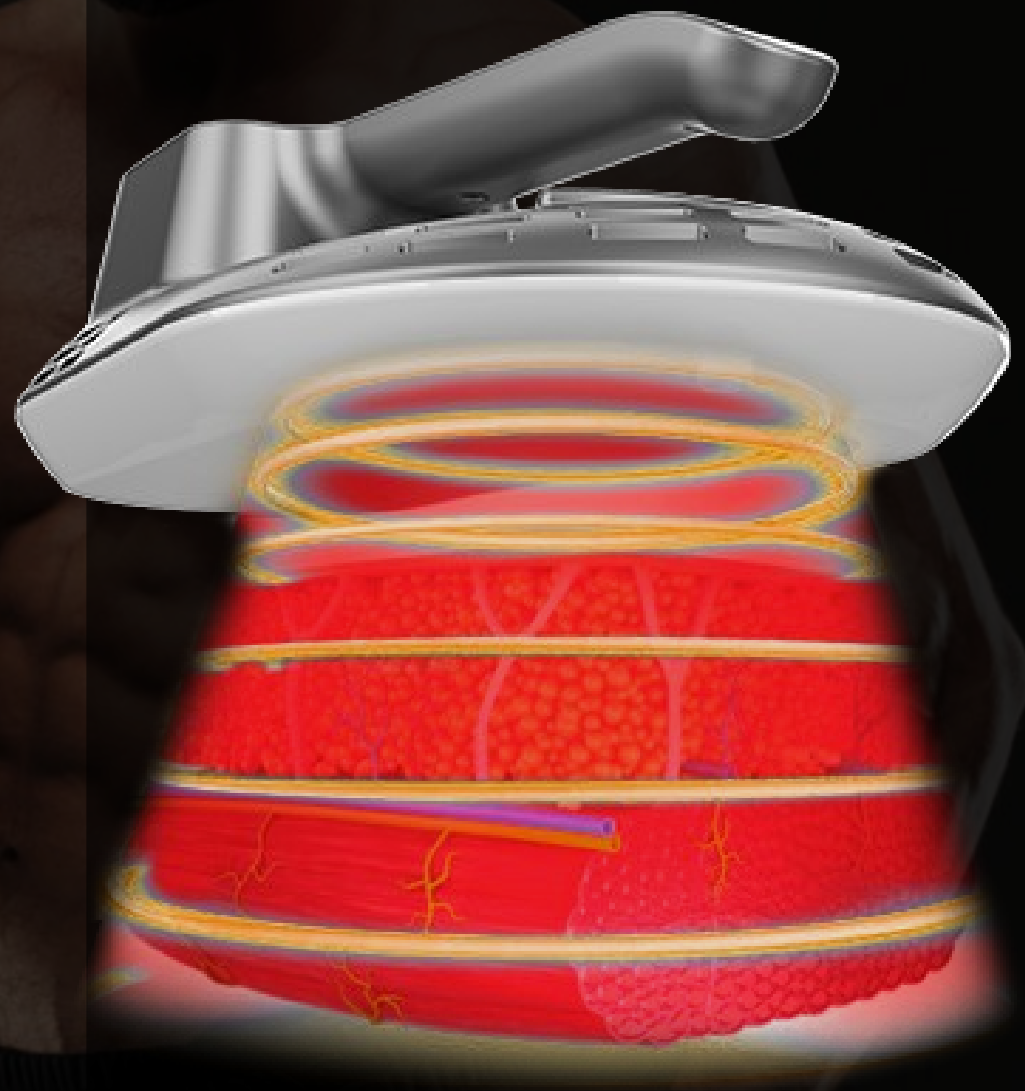

EMS + RF KEZELŐFEJ



4 kezelőfej egyidejű
működtetése



Opcionálisan
választható
medencefenék-
kezelő fej



MAGSHAPE PRO

A Magshape az egyetlen olyan eljárás, amely egyszerre segíti az izomépítést és a test formálását. A kezelés intenzív edzéshez hasonló érzetet nyújt, miközben hozzájárulhat az egészség és a fizikai állapot javításához.

Alkalmas testformálásra, izomtömeg-növelésre, zsírcsökkentésre, a hasizmok definiálására, valamint a fenék formálására és megemelésére.

A világ első non-invazív fenékemelő eljárását kínálja. A kezelés nem igényel sebészeti beavatkozást, felépülési időt, illetve elő- vagy utókezelési előkészületeket.

A kezelés nagy intenzitású, fókuszált elektromágneses energián alapul. Egyetlen Magshape-kezelés több ezer erőteljes izom-összehúzódnást vált ki, amelyek jelentős szerepet játszanak az izmok tónusának és erejének javításában.

A technológia supermaximális izom-összehúzódnások kiváltásával működik, amelyek arra készítetik az izomszövetet, hogy alkalmazkodjon ehhez a rendkívüli terheléshez.

Ennek hatására az izmok belső szerkezete jelentős átalakuláson megy keresztül, ami elősegíti az izomtömeg növekedését, az izmok feszeesebbé és tónusosabbá válását, valamint a zsírégetést.

A hasi zsírréteg csökkentésével és az alatta található izomzat egyidejű erősítésével segíti a karcsúbb, feszeesebb és sportosabb testkontúr kialakítását.

Ajánlott kezelési terv: alkalmanként 30 perces kezelés, legalább 4 alkalommal, a kezeléseket között 7 napos időközökkel.

A kezelést végző szakember az egyéni céloknak megfelelő, személyre szabott kezelési terv összeállításában is segítséget nyújt.

30 = 30.000

Perces kezelés

Edzésnek megfelelő izomösszehúzódások

RF & HIEMT+
for Fat & Muscle

LESS

Fat

+25%
Muscle
on average

MORE

LESS

-30%
Fat

Muscle **MORE**

COMBINED 30-MIN.
TREATMENT

MORE for LESS



ELŐNYÖK

- Egyidejű izomépítés és zsírcsökkentés
- Non-invazív fenékemelés
- Széles körben alkalmazható, érzéstelenítés és műtéti beavatkozás nélkül
- Rövid kezelési idő: egy alkalom mindössze 30 perc
- Mindössze 4 kezelés ajánlott, 5–10 napos időközönként
- Intenzív edzéshez hasonló érzet
- Biztonságos eljárás, felépülési idő nélkül
- A folyamat már közvetlenül a kezelés után megkezdődik, a látványosabb eredmények általában 2–4 hét elteltével jelentkeznek
- Az izomtömeg átlagosan akár 25%-kal növekedhet
- A zsírréteg átlagosan akár 30%-kal csökkenhet



MŰSZAKI ADATOK



Műszaki adatok

Mágneses tér erőssége (energia)	0-7tesla
Teljesítmény	4300W
RF-teljesítmény	120W
Frekvencia	F1:1-10Hz F2:1-100Hz
Impulzusszélesség	300us
Üzem mód	model-I (Sport mód) model-II (Kimélő mód) model-III (Professzionális mód)
Kijelző	10.4 inch
Kezelőfejek	I-B1 、 II-B2
A készülék mérete	1200mm*420mm*550mm
A csomag mérete	1230mm*580mm*820mm
Nettó tömeg	63kg
Bruttó tömeg	97kg

Alaptartozék



Alaptartozék



Opcionális



Alkalmazási
területek:

Has



Fenék



Comb



Alkalmazási
területek :

Comb



Kar



Lábak



Alkalmazási
területek :

Urológiai és
nőgyógyászati
alkalmazás




Szülés utáni
regeneráció




RENDSZERMÓDOK


3 ÜZEMMÓD

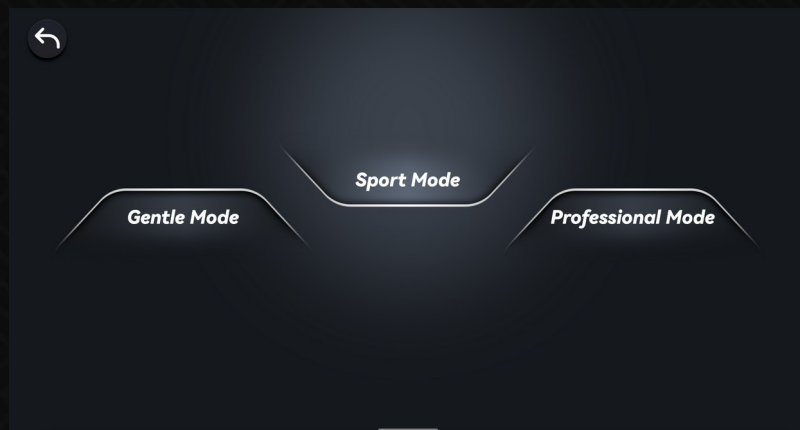

Sport Mód

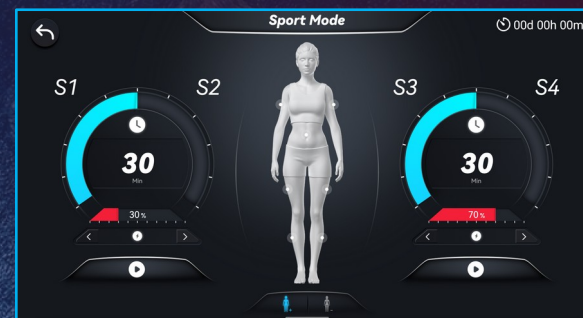

Kímélő Mód

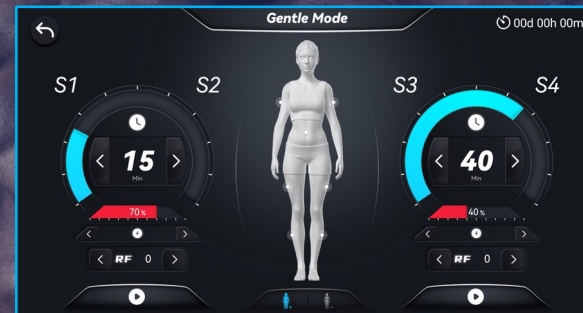

Professzionális
Mód



MAGSHAPE

TIME-IT

ÜGYFÉL CRM RENDSZER



※ Ügyféladatok tárolása


A screenshot of a mobile application interface for customer selection. At the top left is a back arrow. Below it are five circular profile icons with names: Cellina, Jackie, Lucas, Sven, and a 'More' button with three dots. Below the icons are two edit icons (a list icon and a pencil icon). At the bottom are three buttons: 'CONFIRM', 'REGISTER', and 'SKIP'.

※ A kezelési paraméterek mentése és visszakeresése minden kezelési időponthoz





A screenshot of a mobile application interface showing treatment history for a user named Rick. At the top left is a back arrow. To the right is the user's profile (Rick, Rick@mot.com) and icons for download and delete. Below the header is a 'Number' field with '1000' and a '1000' button. Below that is a 'YEAR' selector set to '2023' and a date '2023.05.10'. Below the year is a 'MONTH' selector with a calendar view showing the month of May 2023. The calendar has dates 1 through 31, with the 5th highlighted. To the right of the calendar is a list of treatment records for the selected date (2023.05.10). Each record shows a table of parameters: Mode, Part, Skin, Frequency, Energy, Refrigeration, Favorite, and Point. The records are for dates 2023.05.19, 2023.05.12, 2023.05.11, 2023.05.10, and 2023.05.02. Each record has a download icon next to it.


Date	Mode	Part	Skin	Frequency	Energy	Refrigeration	Favorite	Point
2023.05.19	FAST	\	\	21	12	\	IV	123
2023.05.12	FAST	\	\	23	10	\	IV	100
2023.05.11	FAST	\	\	22	11	\	IV	45
2023.05.10	FAST	\	\	25	17	\	IV	33
2023.05.02	FAST	\	\	17	21	\	IV	4

FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

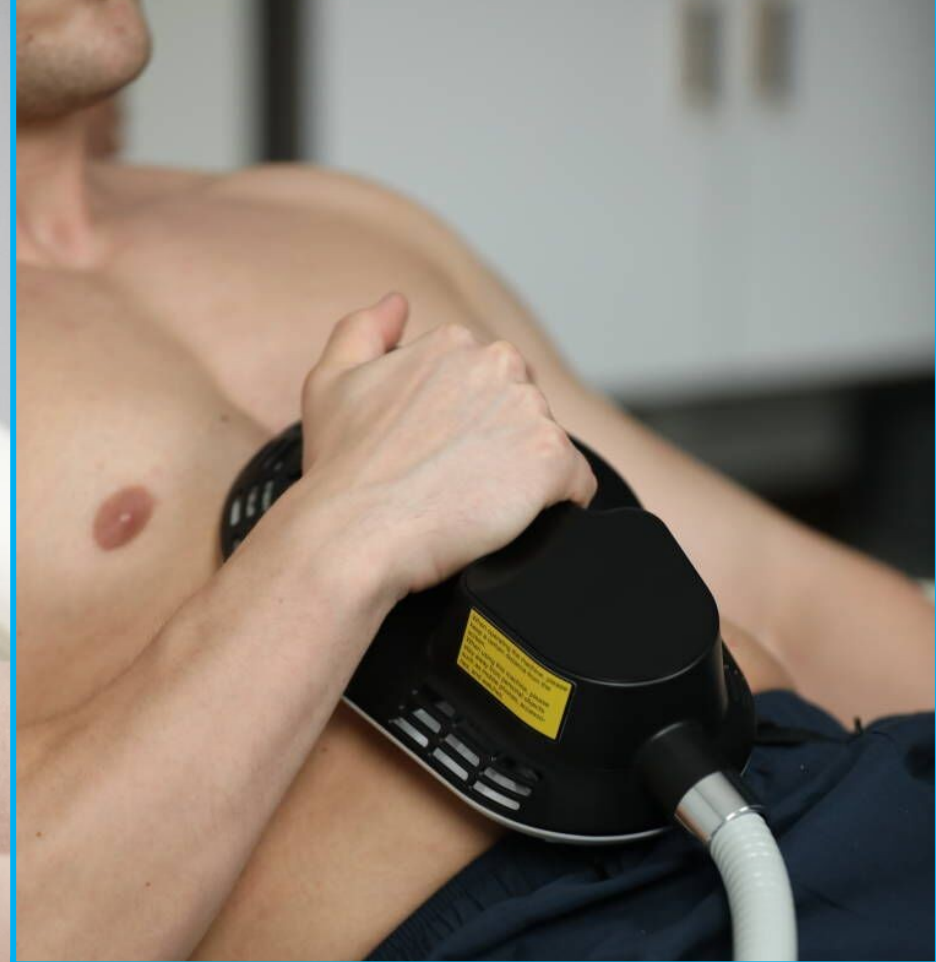

ELŐTTE & UTÁNA

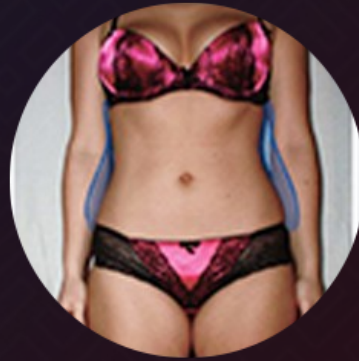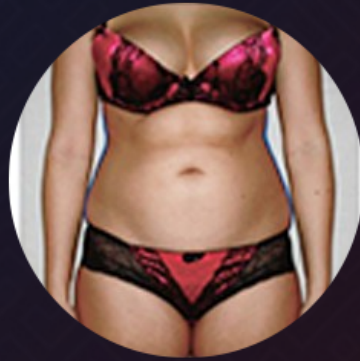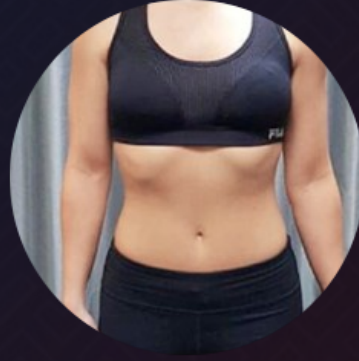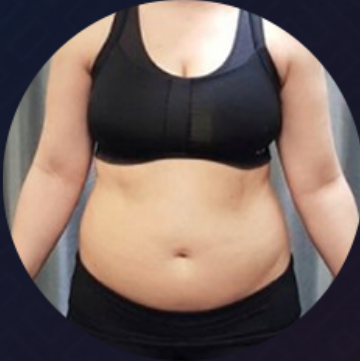

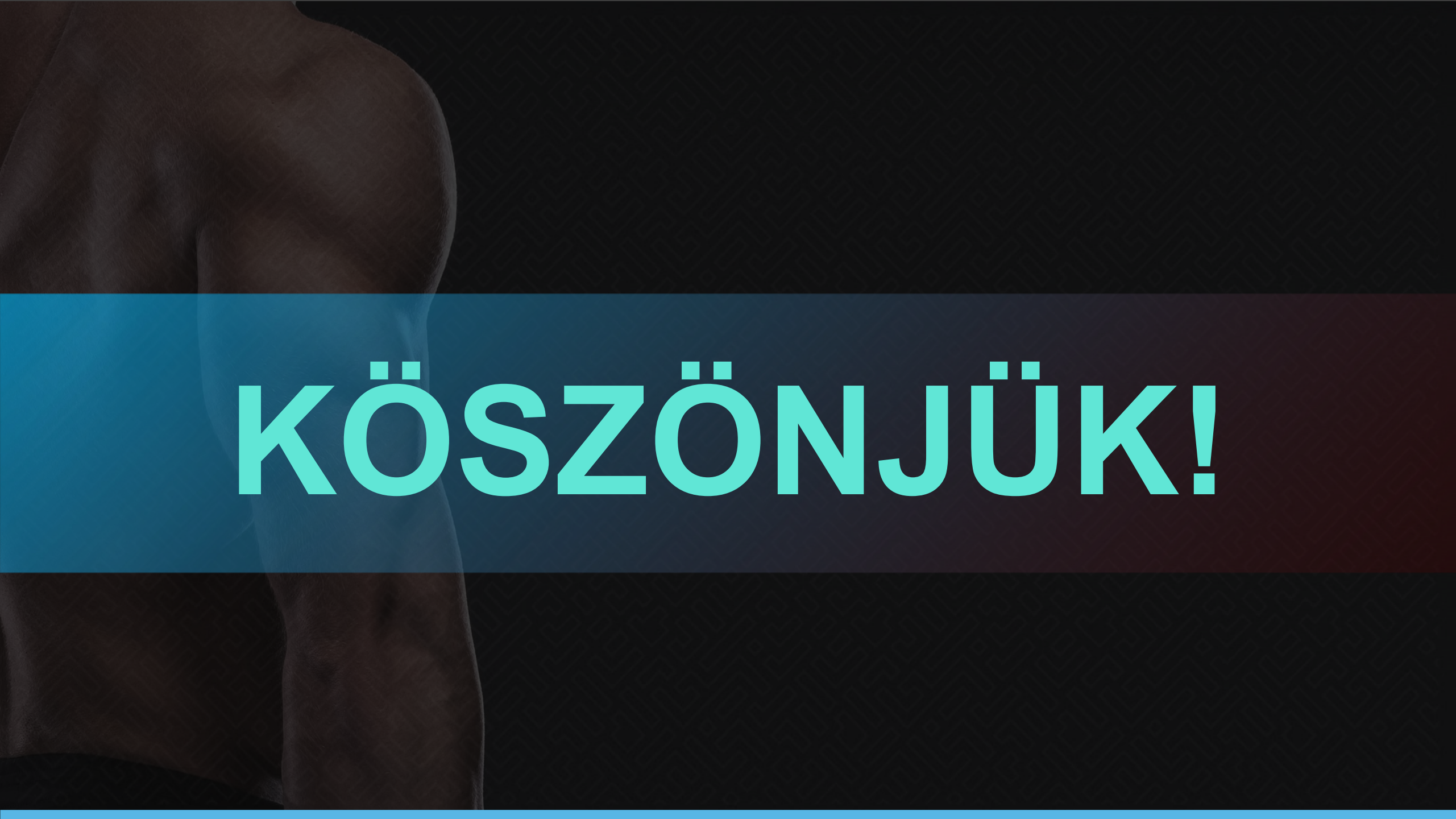

KÖSZÖNJÜK!